

Interne opslagtank

Als u de interne opslagtank voor de voedingswatertoevoer gebruikt, voert u de regelmatige controle en reiniging als volgt uit:

Interval	
Bij elke bijvulling	Controleert u de opslagtank op vervuiling. Reinig indien nodig de opslagtank met een doek en vers voedingswater voordat u de opslagtank opnieuw vult.
Wekelijks	Vervang het voedingswater volledig.
Om de 2 weken	Reinig de linkerkamer van de opslagtank (afvalwater).



TIP

Houd de opslagtank vrij van vervuilingen.


Als u het voedingswater handmatig via de interne opslagtank toevoert, controleer dan de kant van het voedingswater (rechterzijde) bij het bijvullen op verontreiniging. Reinig indien nodig de opslagtank met een doek en vers voedingswater voordat u de opslagtank opnieuw vult.

Maak de twee kamers van de opslagtank als volgt leeg:

1. Verwijder de vultrechter onder het tankdeksel.
2. Open de deur van het apparaat. Steek de ledigingsslang linksonder in de aansluiting van het apparaat (afvalwatertank links, voedingswatertank rechts). Het apparaat is voorzien van twee snelkoppelingen of twee ontlastkleppen.


Snelkoppeling:

De ledigingsslang wordt duidelijk te merken aangesloten.

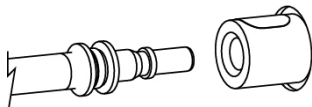

Ontlastklep:

Draai de ledigingsslang tegen de richting van de wijzers van de klok in tot de aanslag.

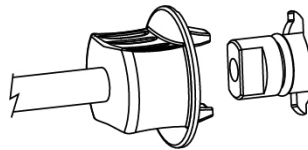

3. Laat het water in een opvangbak van minstens vijf liter volume lopen.
4. Herhaal indien nodig de procedure voor de andere kamer.
5. Breng de vultrechter weer aan.
6. Verwijder de ledigingsslang en houd daarbij rekening met de volgende instructies:



VOORZICHTIG

Snelkoppeling: Verwondingsgevaar bij het verwijderen van de ledigingsslang

- Ga zijdelings vóór de aansluiting staan om de voorraads kamers te legen.
- Druk op de grijze ontgrendelingsknop op de snelkoppeling. U moet bij het indrukken met uw andere hand de slang vasthouden om de veerkracht van de vergrendeling op te vangen. De slang komt automatisch uit de koppeling.



VOORZICHTIG

Ontlastklep: Verwondingsgevaar door stoten aan de deur van het apparaat bij het verwijderen van de ledigingsslang

- Draai de slangaansluiting terug naar de verticale positie.
- Verwijder de ledigingsslang met beide handen door de ledigingsslang iets naar beneden van het apparaat weg te trekken.