

Réservoir eau déminéralisée interne (chambre droite du réservoir)

Si vous utilisez le réservoir interne pour l'alimentation en eau d'alimentation, effectuez le contrôle régulier et le nettoyage comme suit :

Intervalle	
À chaque complétion de niveau	Vérifiez que le réservoir soit exempt d'impuretés. Nettoyez le réservoir le cas échéant avant le remplissage avec un chiffon et de l'eau d'alimentation fraîche.
Hebdomadaire	Remplacez complètement l'eau d'alimentation.
Toutes les 2 semaines	Nettoyez la chambre de gauche du réservoir (eaux usées).



REMARQUE

Maintenez le réservoir exempt d'impuretés.

Si vous effectuez l'alimentation en eau d'alimentation manuellement par le réservoir interne, contrôlez la présence d'impuretés du côté eau d'alimentation (côté droit) lors de la complétion. Nettoyez le réservoir le cas échéant avant le remplissage avec un chiffon et de l'eau d'alimentation fraîche.

Videz les deux chambres du réservoir comme suit :

- Retirer la trémie de remplissage sous le couvercle du réservoir.
- Ouvrez la porte de l'appareil. Branchez le tuyau de vidange se trouvant en bas à gauche sur le raccord de l'appareil (réservoir à eaux usées à gauche, réservoir à eau d'alimentation à droite). Deux accouplements rapides ou deux robinets d'écoulement se trouvent sur l'appareil.


Accouplement rapide :

Le tuyau de vidange s'enclenche de manière audible.



Robinet d'écoulement :

Tournez le tuyau de vidange jusqu'à la butée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

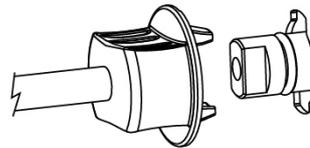

- Évacuez l'eau dans un récipient d'une capacité d'au moins 5 l.
- Répétez l'opération le cas échéant pour les autres chambres.
- Remettez en place l'entonnoir de remplissage.
- Retirez le tuyau de vidange en respectant les consignes suivantes :



ATTENTION

Accouplement rapide : Risque de blessures à l'enlèvement du tuyau de vidange

- Placez-vous sur le côté devant le raccord pour vider les chambres de réservoir.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris sur l'accouplement rapide. En appuyant, maintenez obligatoirement de l'autre main le tuyau pour réceptionner la force ressort de la fermeture. Le flexible se détache par lui-même du raccord.



ATTENTION

Robinet d'écoulement : Risque de blessures lors de chocs sur la porte de l'appareil au moment de retirer le tuyau de vidange

- Tournez à nouveau le raccord du tuyau à la verticale.
- Retirez le tuyau de vidange des deux mains en défaisant légèrement le tuyau de vidange de l'appareil vers le bas.